

PidPort

ご利用説明



ログイン方法

Medmain

ようこそ

PidPortを使用するにはMedmain Inc.にログインしてください。

メールアドレス

パスワード


パスワードをお忘れですか？

続ける


メールアドレス、パスワードを入力してください

【ログイン用URL】 <https://pidport.com>
※「PidPortログイン」で検索してください


基本操作

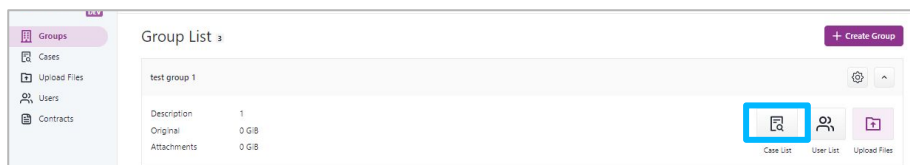


Case Listをクリックします

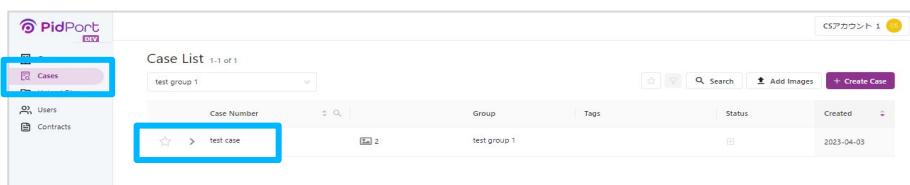

Case を選択します

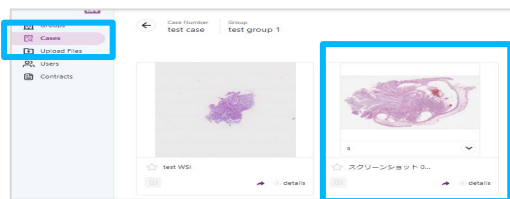


画像を選択します

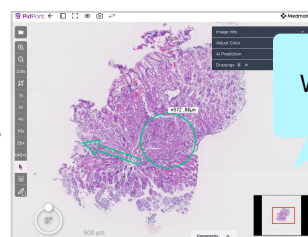

WSIが閲覧できます

機能紹介

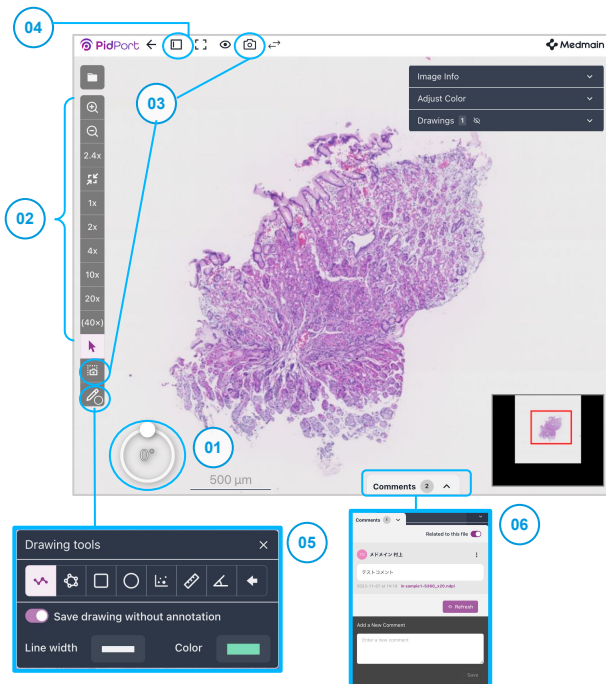

Administrator

Member

Read Only

①画像回転

円周上の位置をクリックして、回転させることが可能

②Zoom in & Zoom out

マウスのマウスホイールもしくは、画面左の固定倍率で操作可能

③スナップショット

.pngで画像取得が可能

④画面分割

最大4枚のWSIを同時閲覧可能

Administrator

Member

⑤アノテーション

画像上に様々なマークを残すことが可能

⑥コメント

WSIを閲覧しながら、コメントの確認・記載が可能